




医療用抗原検査キットを 購入する方へ

(アドテスト® SARS-CoV-2 NEO)

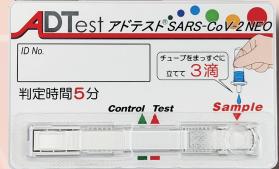

1.はじめに

症状がある場合や、体調が悪いことを自覚した場合には、出勤や通学をせず医療機関を受診してください。体調が気になる場合等にセルフチェックとして本キットを使用し、陽性の場合には速やかに医療機関を受診してください。

ウイルス量の少ない感染初期には、抗原検査キットでは検出できず陰性となるため、引き続き感染予防対策は継続してください。

2.使用にあたっての注意点

- 初めに、検査に関する注意点、使い方を理解してから検査を実施してください。
- 鼻腔ぬぐい液を自ら採取して検査を行ってください。



(鼻から綿棒を2cm程度挿入し、5回程度回転させ、数秒間静置し、鼻腔ぬぐい液を採取します)



※採取のタイミングは、時間帯や飲食、服薬に影響されないため、いつでも問題ありません。
※採取時はマスクを着用し、窓を開放した風通しの良い室内で検体の飛沫が飛び散らないように注意してください。
※鼻腔ぬぐい液の採取時はくしゃみが出やすいので、マスクから鼻だけを出し、採取してください。
※鼻腔ぬぐい液の採取は医療従事者もしくはご自身しかできません。自分で採取できない方は医療機関を受診してください。
※目的外の使用や、他者への販売および転売は禁止されています。

操作方法

※検体採取前に滅菌綿棒を検体抽出液に漬けないでください。

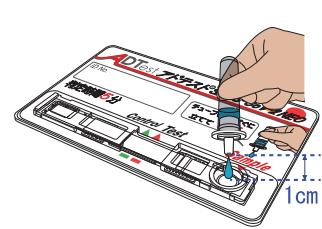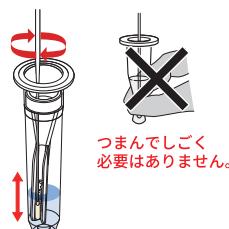

綿棒の先から2cmの部分を持ち鼻腔にそって挿入し、ゆっくり5回程度回転させた後、数秒待ちます。

綿棒を検体抽出液に浸した状態で、検体抽出部でゆっくりと上下させながら5~10回程度回転させます。

ゆっくりと綿棒を引き抜き付属のフィルター付きノズルをしっかりとはめこんでください。

チューブをまっすぐに立てて検体滴下部(Sample▼)とノズルの間を1cm程度空けて3滴をゆっくりと滴下します。

結果判定



陽性



Control▲下に緑色のラインが出現し、Test▲の下にも赤色のラインが出現します。

陰性



Control▲の下に緑色のラインが出現し、Test▲の下にはラインが出現しません。

5分以内にControl▲ライン(緑色)とTest▲ライン(赤色)の両方が認められた場合、陽性と判定できます。

3.検査後の対応



陽性の場合

新型コロナウイルス感染症が強く疑われます。陽性者を隔離の上、消毒清掃を徹底し、速やかに「かかりつけ医」または最寄りの医療機関に連絡してください。

新型コロナウイルス感染症の確定診断後は、保健所の指示に従ってください。



陰性の場合

陰性であっても新型コロナウイルスに感染していないとまでは言い切れません。感染初期(1、2日目)等のウイルス量が少ない例では検出できないことがあります。

引き続きの感染予防対策は徹底してください。可能であれば、数日後、再度の検査をお勧めします。


4.受診方法の相談等

結果等を踏まえて受診する場合は、まずは「かかりつけ医」等の地域で身近な医療機関に電話でご相談ください。院内感染を防止するため、緊急の場合を除き、連絡なく医療機関を直接受診することは控えてください。
かかりつけ医がいないなど相談先に迷った場合は「受診・相談センター」(地域により名称が異なることがあります)にご相談ください。

5.抗原検査キットの保管、廃棄等

保管方法

本キットは、1°C～30°Cの暗所(もしくは冷蔵庫)で保管してください。冷蔵庫で保管していた場合は、冷蔵庫から出して15～20分程度室温に置き、キットを室内温度に戻してから開封してください。開封後は直ちに使用してください。

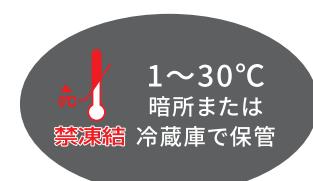

廃棄方法

ご家庭等で使用したキット(綿棒、チューブ等を含む)を廃棄する時は、ごみ袋に入れて、開口部をしっかりと封をしてください。また、ごみが袋の外面に触れた場合や袋が破れている場合は二重にごみ袋に入れる等、散乱しないように気を付けてください。その後2～3日置いて家庭ごみとして廃棄してください。



その他、検査キットに関するご質問について

ご不明な点がございましたら、下記までお気軽にご連絡ください。

●製造販売元

 **アドテック株式会社**

〒879-0453

大分県宇佐市大字上田1770番地の1

信頼性保証部 **0978-34-7771**

FAX 0978-34-7780 / <https://adtec-inc.co.jp>

最新情報はQRコードの「Q&A」をご確認ください。

